



neodisher[®] Mielclear



Produit de rinçage pour le traitement en machine d'instruments dentaires



Concentré liquide

Domaine d'application :

- Rinçage en machine d'instruments dentaires, d'ustensiles et de plateaux utilisés en cabinet dentaire ou dans des cliniques de médecine dentaire et maxillaire.

Spectre d'efficacité :

- Assure le mouillage des surfaces en acier inoxydable ainsi que des surfaces de matières plastiques difficilement mouillables.

Propriétés particulières :

- Neutralise les résidus alcalins et les eaux alcalines.

Utilisation et dosage :

neodisher Mielclear s'utilise dans les laveurs-désinfecteurs pour instruments dentaires. Le dosage s'effectue automatiquement via le système de dosage intégré lors du dernier rinçage et s'élève à 0,2 à 0,4 ml/l.

Pour le dosage, utiliser des systèmes de dosage appropriés.

Recommandations d'utilisation générales :

- Uniquement pour usage professionnel.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Avant tout changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage et les tuyaux d'aspiration.
- Les notices d'instructions des fabricants des laveurs-désinfecteurs doivent être respectées.
- Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes appropriées et validées.
- Les recommandations générales

médicaux sont à respecter conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664.

Données techniques :

Valeur pH	4,1 - 3,5 (0,2 - 0,4 ml/l, déterminé en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 50 mPa s (concentré, 20 °C)
Densité	environ 1,1 g/cm ³ (20 °C)

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :
< 5 % tensioactifs non ioniques, phosphates

Marquage CE :

neodisher Mielclear satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de stockage :

Conserver à l'abri du gel. Conserver à une température comprise entre 0 et 30 °C. Durée de conservation en cas de stockage conforme : 3 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole

Indications de risques et de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. Élimination de

Les informations fournies dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas pour autant l'utilisateur de procéder à ses propres tests et essais.



neodisher[®] Mielclear

produit restant : voir la fiche de données de sécurité.

MB 4119/3-1
Version : 09/2020

Les informations fournies dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas pour autant l'utilisateur de procéder à ses propres tests et essais.
